



Cochlear®
Hear now. And always



Instrutivo Cocleando®

Cocleando da Cochlear™

É um aplicativo que enriquece o desenvolvimento da percepção auditiva em crianças com implante Cochlear™ Nucleus e Baha® e visa ajudar pais e profissionais a complementar o trabalho de reabilitação que as crianças implantadas realizam de maneira divertida e agradável.

Está disponível em todas as versões e plataformas:

IOS: iPhone, iPad - **Android:** Tablet, Smartphone - ***Web:** Google Chrome, Explorer, Safari, Firefox.

*Alguns dos recursos não estarão disponíveis nesta opção

Depois de baixar o aplicativo,
você deve inserir e executar as
seguintes etapas:

1. SELECIONE A OPÇÃO REGISTRAR



ESCREVA SEU NOME COMPLETO E EMAIL

Terapeuta registro Tutor

Hear now. And always. Cochlear®

Nome Completo

Email

Código de validação por país

Senha Confirmar senha

Eu sou terapeuta / Profissional de saúde

Eu sou pai / responsável

Cancelar Continuar


Para obter o seu código de verificação, basta entrar em contato com seu representante local da Cochlear e solicitá-lo, fornecendo seus dados de usuário.

Registre uma senha e confirme.

Selecione se você é um cuidador ou terapeuta.


Clique em continuar.

2. DIGITE AS INFORMAÇÕES

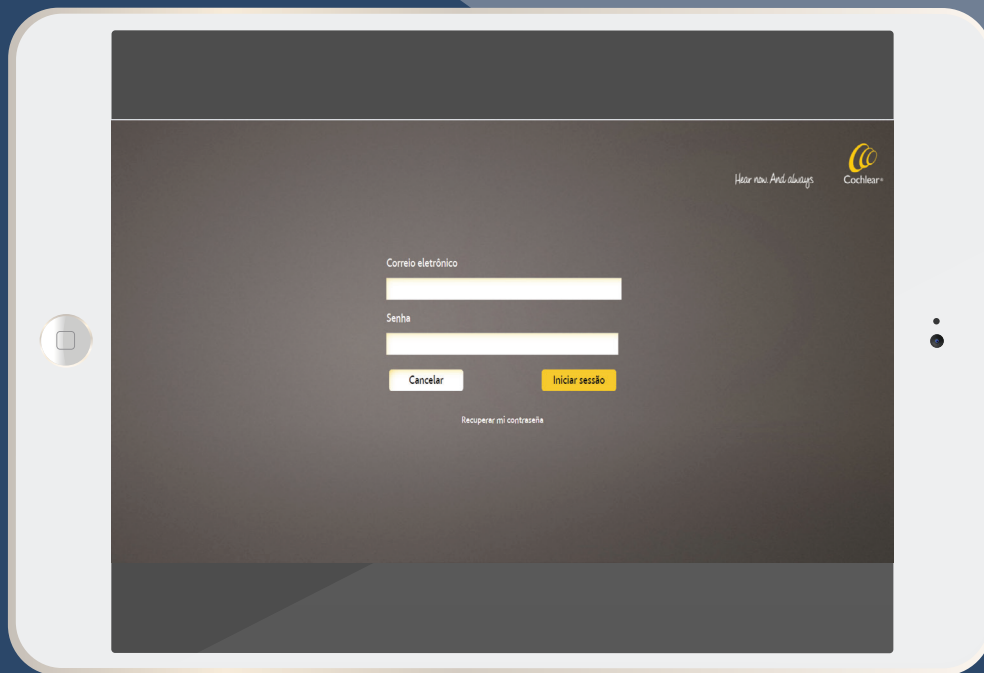

COLOQUE SEU EMAIL E SENHA
CLIQUE EM ENTRAR


3. SELECIONE A OPÇÃO DE IMAGEM QUE DESEJAR

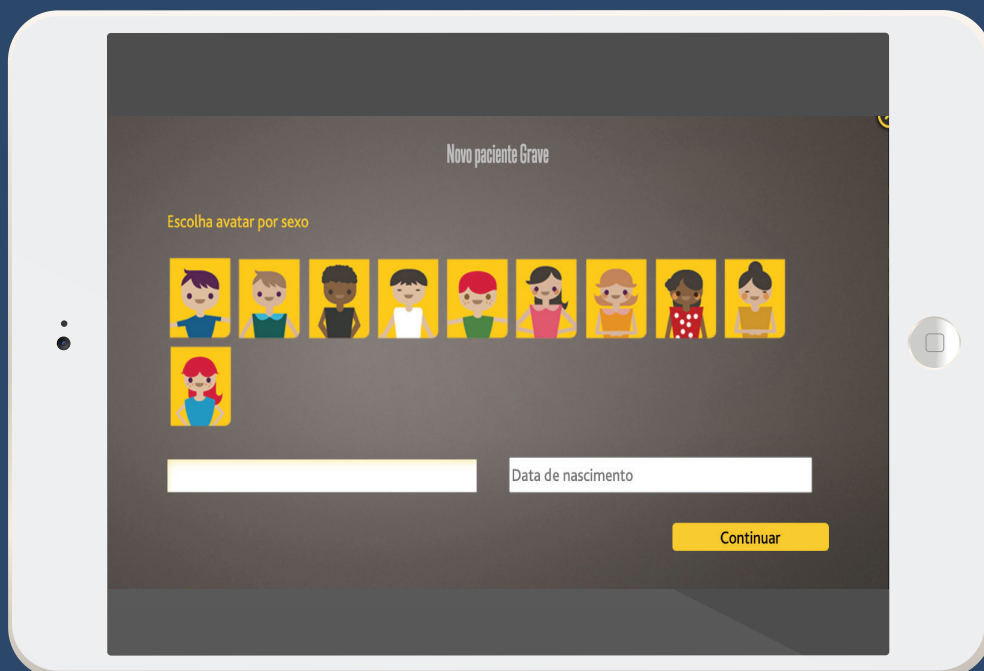

ESCREVA O NOME DA CRIANÇA
DATA DE NASCIMENTO
CLIQUE EM CONTINUAR

Escolha as habilidades auditivas que você deseja estimular e / ou reforçar na criança e habilite-as selecionando a caixa correspondente.

4. SELECIONE JOGOS

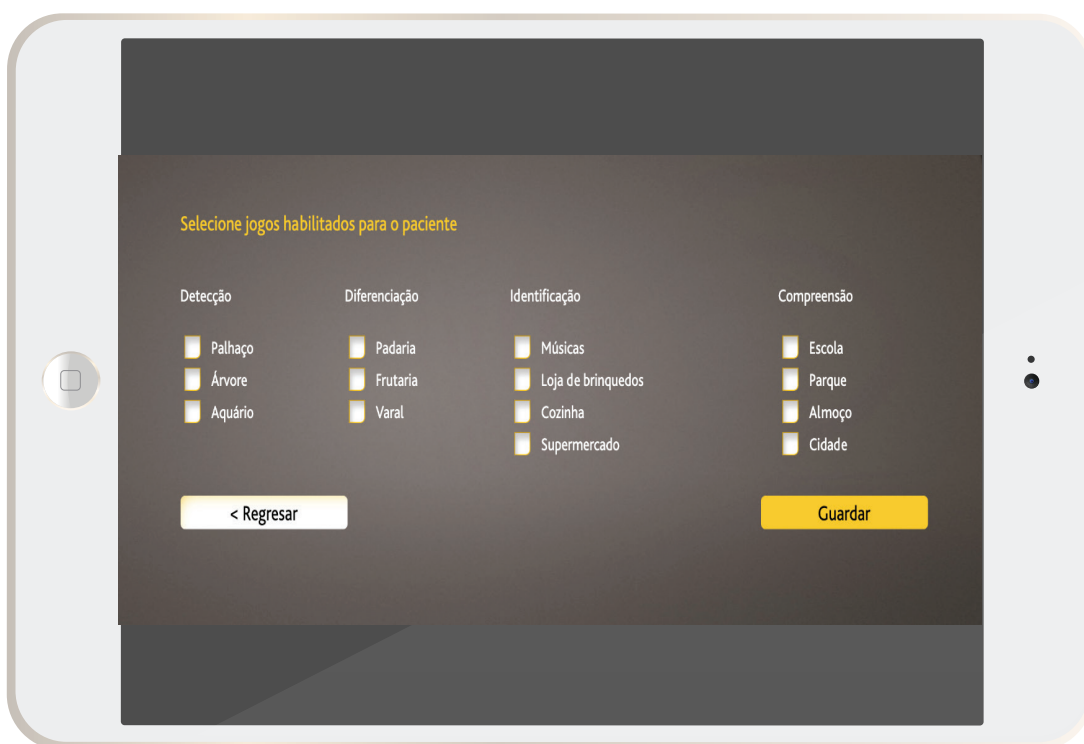

CLIQUE EM CRIAR PERFIL DE PACIENTE.

2. PERFIL DO USUÁRIO



SELECIONE A ATIVIDADE QUE DESEJA REALIZAR
ACOMPANHE E APROVEITE O PROCESSO AUDITIVO COM A CRIANÇA




Hear now. And always

Como líder mundial em soluções auditivas implantáveis, a Cochlear se dedica a ajudar as pessoas com perda auditiva moderada a profunda a viver uma vida repleta de audição. Já proporcionamos mais de 600.000 dispositivos implantáveis, que ajudaram as pessoas de todas as idades a ouvir e a se conectar com as oportunidades da vida.

Desejamos proporcionar às pessoas a melhor experiência auditiva para toda a vida e o acesso a tecnologias futuras inovadoras. Temos as melhores redes clínicas, de pesquisa e de apoio do setor.

Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas preferem a Cochlear ao invés do resto das marcas de implantes auditivos

 **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205
Cochlear Latinoamérica S.A. International Business Park, Building 3835, Office 403, Panama Pacífico, Panama Tel: +507 830 6220 Fax: +507 830 6218
Cochlear Colombia S.A.S. AK 9 #115-06, Oficina 1201 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia Tel: +57 1 7563346
Cochlear México Dirección Avenida Tamaulipas No. 150-A Piso 9. Col. Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, C.P. 06170 Mexico, D.F. Tel: +52 55 52 11 87 14

www.cochlear.com.br Nos siga em:    

Peça conselho ao seu profissional da saúde sobre os tratamentos para surdez. Os resultados podem variar e o profissional da saúde te indicará que fatores podem afetar os seus resultados. Leia sempre as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Se deseja obter informação sobre os produtos, entre em contato com o representante local da Cochlear.

Cochlear, Cochlear, 科利耳, コクレア, **코클리어** Hear now. And always, o logotipo elíptico e as marcas com o símbolo ® ou ™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Cochlear Bone Anchored Solutions AB ou da Cochlear Limited (a menos que indicado de outra forma).

Cocleando é uma criação da Dra. Lilian Flores e do Lic. Facundo Borlando.

© Cochlear Limited 2020. Todos os direitos reservados. D1778444-2 Instructivo Cocleando PT-BR CLASA.

