

“É muito fácil de usar e posso fazer todas as mudanças que eu quiser em minha experiência auditiva em tempo real.”

Jack, usuário do aplicativo Nucleus® Smart


## Tenha o controle de sua experiência auditiva

O aplicativo Cochlear™ Nucleus® Smart oferece a você a opção de controlar os ajustes e a funcionalidade do seu processador de som diretamente a partir de um dispositivo Apple ou Android™ compatível.

- ✓ Mudar programas
- ✓ Ligar e desligar o ForwardFocus<sup>^</sup>
- ✓ Ajustar o volume
- ✓ Monitorar o estado da bateria
- ✓ Acessar uma ampla série de ferramentas de audição através do Remote Check<sup>#</sup>
- ✓ Controlar fontes de áudio como os dispositivos Cochlear™ True Wireless™
- ✓ Estabelecer metas auditivas diárias com a função Hearing Tracker
- ✓ Localizar um processador de som perdido
- ✓ Atualizar seu processador de som remotamente\*\*

Se você precisar de suporte extra para ouvir melhor em ambientes auditivos desafiadores, o ForwardFocus<sup>^</sup> reduz significativamente o ruído que vem de trás de você, para que possa desfrutar mais facilmente de uma conversa cara a cara.<sup>1</sup>

Uma vez habilitado por seu profissional da saúde, o ForwardFocus é fácil de usar através do aplicativo Nucleus Smart em seu smartphone ou Apple Watch.

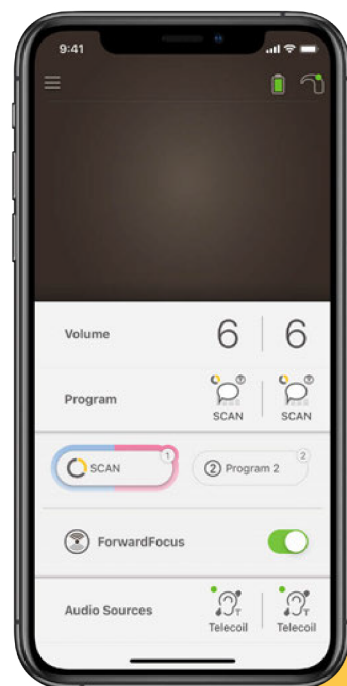

# Comece a usar o aplicativo Nucleus Smart



Disponível para baixar grátis na App Store ou Google Play



- 1** Baixe o aplicativo Nucleus Smart na App Store ou Google Play. É grátis!
- 2** Inicie sessão com os detalhes de sua conta Cochlear ou siga as instruções do aplicativo para criar uma conta.
- 3** Pareie seu processador de som Nucleus 7 ou Kanso® 2 com o seu dispositivo Apple ou Android™ compatível\*. Há instruções no guia de pareamento do seu processador de som ou veja o tutorial “Como parear” on-line.
- 4** Toque em “Modo de demonstração” para começar a aprender sobre as diferentes funções e características. Experimente os seguintes conselhos para ganhar confiança no uso do aplicativo de forma rápida e discreta em sua vida cotidiana.
- 5** Pergunte a seu médico se o ForwardFocus<sup>^</sup> pode beneficiá-lo.

## Conselhos para controlar sua experiência auditiva

### Ajustar o volume

Tente ajustar o volume em diferentes situações de escuta. Você pode fazer isso na tela inicial do aplicativo, tocando nos botões de mais ou de menos.

### Estabelecer metas auditivas diárias

Localizado no menu do aplicativo, o Hearing Tracker (acompanhamento auditivo) permite que você controle a quantidade de tempo que passa em ambientes de fala. Estabeleça uma meta para aumentar seu tempo de fala a cada dia e consulte os conselhos do aplicativo para atingi-la.

### Praticar o uso do ForwardFocus

Se for difícil ouvir uma conversa em meio ao ruído, fale com seu profissional de saúde sobre a possibilidade de ativar o ForwardFocus. Uma vez habilitado, simplesmente ligue-o na aba “Program” (Programa) do aplicativo quando quiser focar em alguém que estiver falando diante de você.

### Passar do ruído ao silêncio

Quando passar da configuração de ruído para a de silêncio, não esqueça de desligar o ForwardFocus no aplicativo. É um bom hábito, mas, se esquecer, seu processador fará isso por você quando for desligado.

Para obter mais informações sobre o aplicativo Nucleus Smart, acesse: [www.nucleusmartapp.com](http://www.nucleusmartapp.com)

\*\*Antes de poderem receber esta funcionalidade remotamente, inicialmente, os pacientes com um processador de som Cochlear Nucleus 7 precisarão visitar a clínica para atualizar seu firmware.

# Remote Check só é visível para os pacientes que foram inscritos por seus médicos. A disponibilidade de soluções de teleatendimento pode variar segundo o país.

<sup>^</sup> ForwardFocus é uma função habilitada pelo médico e controlada pelo usuário.

\* O aplicativo Nucleus Smart da Cochlear está disponível na App Store e Google Play. Os processadores de som Cochlear Nucleus 7 e Kanso 2 são compatíveis com dispositivos Apple e Android. Para obter mais informações sobre a compatibilidade, acesse [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility).

1. Cochlear Limited. D1376556. CLTD 5709 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. Janeiro; 2018.

Siga os conselhos do seu profissional da saúde sobre os tratamentos para a perda auditiva. Os resultados podem variar e seu profissional da saúde o aconselhará sobre os fatores que poderiam influenciar no resultado. Leia sempre as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Para obter informações sobre o produto, comunique-se com seu representante local da Cochlear.

As opiniões expressas são as do indivíduo. Consulte seu profissional de saúde para determinar se você é elegível para a tecnologia Cochlear.

Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Advance Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound, Freedom, Hybrid, NRT, SmartSound, True Wireless, o logotipo da elíptica e as marcas que têm um símbolo ® ou ™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cochlear Limited (a menos que seja indicado o contrário).

Apple, o logotipo da Apple, o Apple Watch e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. App Store é um serviço da marca de Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e outros países.

Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

© Cochlear Limited 2021. D1878471 V1 2021-09